

Dr. med. Jutta Esser
Dr. med. Petra Nußbaum-Packeisen
PD Dr. med. Florian Szabados
Dr. med. Peter Kohlschein

Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Virologie,
Infektionsepidemiologie, Bluttransfusionswesen,
Umweltmedizin, Trinkwasser- und
Hygieneuntersuchungen

Rostocker Straße 5-7
49124 Georgsmarienhütte

Tel. 05401/3391-0
Fax 05401/3391-329
info@oslab.de // www.oslab.de

Labor Information

Speichelsammlung für Cortisol Analyse

Bitte verwenden Sie für die Cortisolbestimmung im Speichel folgendes Entnahmesystem:



Cortisol-Salivette®,
Fa. Sarstedt, Best. Nr. 51.1534.500

Die Speichelgewinnung darf frühestens 30 Minuten nach der Aufnahme von fester oder flüssiger Nahrung durchgeführt werden. Bei morgendlicher Gewinnung vor dem Zähneputzen.

Bitte beachten Sie folgendes Vorgehen für die Speichelgewinnung:

- 1) Das Probengefäß öffnen, den Deckel auf dem Rücken ablegen.
- 2) Die Watterrolle der Salivette® entnehmen (Plastikeinsatz verbleibt in der Salivette®).
- 3) Die Watterrolle unter die Zunge legen oder leicht kauen und so lange im Mund halten bis die Watterrolle mit Speichel durchtränkt ist (ca. 1-2 Minuten).
- 4) Die eingespeichelte Watterrolle in das Einhängegefäß zurückgeben und die Salivette® mit dem Stopfen wieder fest verschließen.



Bitte vergessen Sie nicht den Namen, den Entnahmetag und –zeit auf der Salivette® zu vermerken.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre
Laborarztpraxis Osnabrück